

ФЛОРОЦЕНОЗ

ИНФОРМАТИВНО ♥ ОБОСНОВАННО ♥ РАЦИОНАЛЬНО

Тест ФЛОРОЦЕНОЗ позволяет провести дифференциальную диагностику следующих заболеваний:

- **Бактериальный вагиноз** (выявление ДНК и определение соотношения *Gardnerella vaginalis*, *Atopobium vaginae*, *Lactobacillus spp.* и *Bacteria spp.* в количественном формате)
- **Аэробный вагинит** (выявление ДНК и определение соотношения *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.* с *Lactobacillus spp.* и *Bacteria spp.* в количественном формате)
- **Кандидозный вульвовагинит** (выявление ДНК *Candida albicans*, *Candida glabrata*, *Candida krusei*, *Candida parapsilosis/tropicalis* в количественном формате)
- **Заболевания, ассоциированные с условно-патогенными микоплазмами** (выявление ДНК *Mycoplasma hominis*, *Ureaplasma parvum* и *Ureaplasma urealyticum* в количественном формате)
- **Гонококковая инфекция** (выявление ДНК *Neisseria gonorrhoeae*)
- **Хламидийная инфекция** (выявление ДНК *Chlamydia trachomatis*)
- **Инфекция, вызванная *M.genitalium*** (выявление ДНК *Mycoplasma genitalium*)
- **Трихомонадная инфекция** (выявление ДНК *Trichomonas vaginalis*)

Скрининг-тест ФЛОРОЦЕНОЗ — выявление основных клинически значимых возбудителей урогенитальных заболеваний у женщин репродуктивного возраста.

ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПОДГОТОВКА К ИССЛЕДОВАНИЮ

- Исследование проводится только женщинам репродуктивного возраста.
- Исследование рекомендовано проводить не ранее, чем через 3-4 недели после последнего применения антибактериальных/антисептических препаратов.
- За 24 часа до взятия биоматериала не рекомендуется совершать половой акт, спринцевание влагалища и другие инвазивные манипуляции.

ПРАВИЛА ЗАБОРА БИОМАТЕРИАЛА

- С помощью универсального гинекологического зонда сделайте соскоб с заднебоковых стенок или свода влагалища.
- Отломайте рабочую часть зонда и оставьте в пробирке с транспортной средой, либо как следует взболтайте, отожмите об стенку пробирки и выбросьте.

Важно! Недопустимо использование многоразовых ножниц для обрезания рабочей поверхности зонда, т.к. это может привести к получению ложноположительных результатов.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ


18+

КОМПЛЕКСНЫЙ ТЕСТ ФЛОРОЦЕНОЗ – УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА К КАЖДОЙ ПАЦИЕНТКЕ

ПЕРВИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ПАЦИЕНТКИ К ВРАЧУ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГУ ИЛИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГУ

Профилактическое обследование ♥ Патологические выделения из половых путей ♥ Зуд, жжение, дискомфорт в области половых органов ♥

Планирование беременности ♥ Инфекционный скрининг в 1м и 3м триместрах беременности ♥ Планирование инвазивных манипуляций на органах малого таза

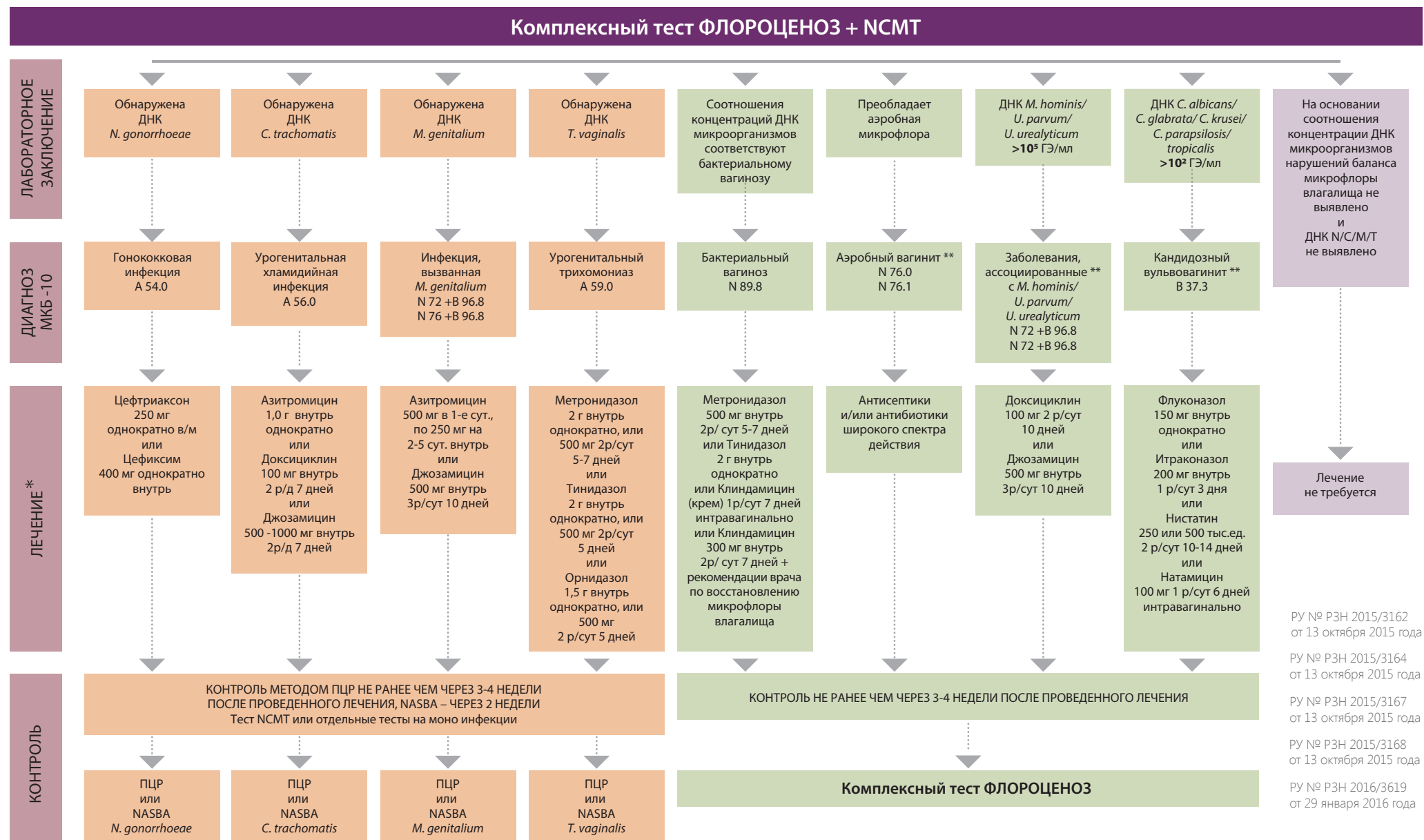

РУ № РЗН 2015/3162 от 13 октября 2015 года
 РУ № РЗН 2015/3164 от 13 октября 2015 года
 РУ № РЗН 2015/3167 от 13 октября 2015 года
 РУ № РЗН 2015/3168 от 13 октября 2015 года
 РУ № РЗН 2016/3619 от 29 января 2016 года

* Лечение небеременных Рекомендации IUSTI (International Union against Sexually Transmitted Infections), Клинические рекомендации РОДВУК, 2015 г., Методические рекомендации №8 ДЗМ от 09.04.15 г., Методические рекомендации №9 ДЗМ от 09.04.15 г.

** При наличии клинических и лабораторных признаков воспаления